

Vedligeholdelse / Smøring af PediPro, Patientstol!

Start med at fjerne plastikafskærmningerne. De er fastgjort med små plastikpropper, som kan tages ud, eller "hovedet" kan skæres af.



Brug en smøre / olie spray,

Det giver optimal smøring når olien kan sprøjtes ind i de bevægelige dele.

Sprøjt olien ind alle de steder der bevæger sig





Der hvor løfte motoren er monteret, i hver ende, er det også vigtigt at smøre! Sprøjt olie på tværaakslen



Skub derefter motoren henholdsvis til den ene



Og til den anden side



Og hvor motoren er monteret i bunden



Vend -->

Her smøres også i begge sider!

